

Seating


Standing

Sleeping

Therapy



Instruction for use part 2 of 2

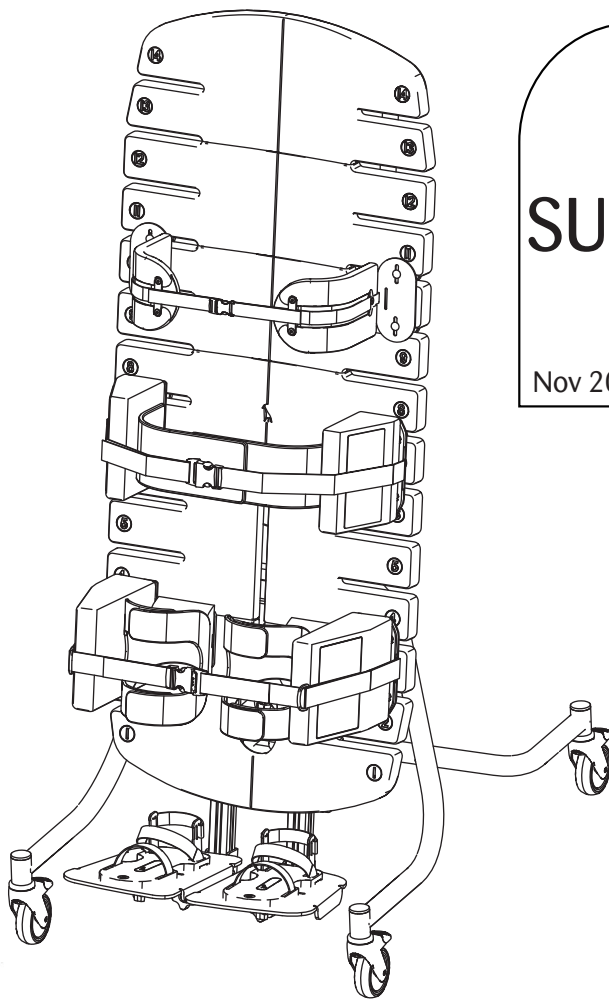

SUP-03S-0*

Nov 2020. Version 011



Read part 1 and part 2 before use





Carers and home users

Cuidadores y usuarios
Auxiliares e utilizadores domésticos
Assistenti ed utenti
Opiekunowie



Re-issue and stores

Reedición y tiendas
Re-edição e lojas
Ortopedie
Sklepy



Professional and technical users

Usuarios profesionales y técnicos
Utilizadores profissionais e técnicos
Terapisti e Tecnici
Profesjonalisci

Product Labels

- Each Jenx product has a number of pictorial safety labels attached, please refer to the explanations below.
- Cada producto de Jenx tiene etiquetas con iconos de seguridad, cuyo significado se explica a continuación.
- Cada produto Jenx tem um número de etiquetas de segurança pictórica em anexo, referem-se às explicações abaixo.
- Il numero di serie è riportato sull'etichetta CE (vedere figura), presente sul prodotto. Indicare sempre questo codice qualora sia necessario contattare Jenx per assistenza.
- Kazdy wyrób firmy Jenx oznaczony jest szeregiem etykiet bezpieczeństwa w formie piktogramów. Ich opisy zamieszczono poniżej.



- Attention / Warning
- Regulaciones
- Atenção/ Aviso
- Attenzione/Avvertenza
- Uwaga!



- Please read Instruction for Use
- Por favor lea las intrucciones
- Leia as instruções
- Leggere le istruzioni
- Prosimy, przeczytaj instrukcję



- Only for indoor use
- Solo para uso en interiores
- Apenas para utilizar em exteriores
- Solo per utilizzo al chiuso
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

- Always fasten and adjust positioning straps and belts to suit the child. Adjust to suit changes in clothing. Allow one fingers width between the belt and the child.
- Presione y ajuste siempre las correas posicionadoras y los cinturones para que el producto se adapte al niño. Ajuste siempre teniendo en cuenta los cambios de ropa. Deje siempre el espacio de un dedo de ancho entre el cinturón y el niño.
- Aperte e ajuste faixas e cintos de posicionamento para se adequar à criança. Ajuste de acordo com a mudança de roupa. Permitem largura de um dedo entre a correia e a criança.
- Allacciare le cinture e le cinghie di posizionamento e regolarle in base alle esigenze del bambino e in base agli indumenti indossati dal bambino. Verificare di riuscire a inserire un dito tra la cintura ed il bambino.
- Upewnij się, że wszystkie pasy są w użyciu



- Do not leave child unattended
- No deje el niño sin vigilancia
- NÃO UTILIZE como dispositivo de mobilidade.
- Nunca utilize o produto em solo irregular ou superfícies desniveladas.
- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki



- DO NOT USE as a mobility device Never use product on rough ground or uneven surface.
- NO USAR ESTO PRODUCTO como un dispositivo de movilidad no usar esto producto o sobre superficies irregulares.
- NÃO UTILIZE como dispositivo de mobilidade. Nunca utilize o produto em solo irregular ou superfícies desniveladas.
- NON UTILIZZARE come dispositivo di mobilità. Non usare il prodotto su terreni irregolari o dissestati.
- NIE UŻYWAJ WYROBU, jako urządzenia transportowego. Nigdy nie korzystaj z wyrobu na nie równej, lub pochyłej nawierzchni.

- User Weight Limit (changes per model and size)
- Peso limite del usuario (cambia por modelo y dimensiones)
- Limite peso de cliente (altera por modelo e tamanho)
- Portata massima (dipende dal modello e dalla misura)
- Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika (zależna od wyrobu i jego rozmiaru)

- Conforms to CE Marking Regulations Medical Devices Regulation (MDR) (EU) 2017/745.
- Cumple con las regulaciones de la marca de la CE Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) (UE) 2017/745.
- Está em conformidade com a Marcação CE Regulamentos Dispositivo Médico Regulamento (MDR) (UE) 2017/745.
- Marchio CE di conformità al Regolamento relativo ai Dispositivi medici (UE) 2017/745.
- Produkt zgodny z przepisami dotyczącymi oznakowania CE i rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych 2017/745/UE.
- Conforms to UKCA Marking Regulations.
- Se ajusta a las regulaciones de la marca de las Evaluaciones de Conformidad del Reino Unido (UKCA).
- Está em conformidade com os Regulamentos de Marcação UKCA.
- Marchio di conformità al Regolamento UKCA.
- Produkt zgodny z przepisami dotyczącymi oznakowania UKCA.

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX[®]
Positioning for life




Minimum Safe Configuration - SUP-03S-0*

Configuración de seguridad mínima



Configurazione base sicura

Configuração de segurança básica

Bezpieczne konfigurasyon

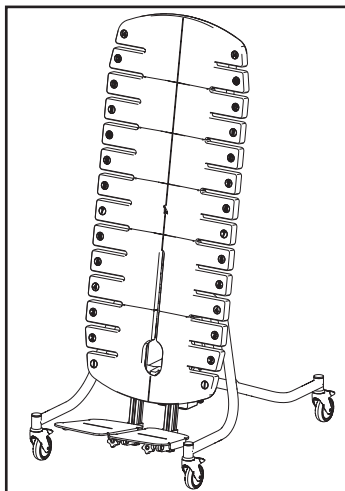

+

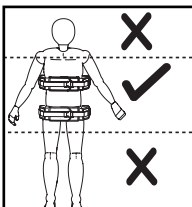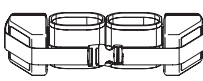 x 2 MB07-0*/ SB36-0*/ SB37-0* MB22-0*/ MB23-0*/ 	 SB38-0*/ SB39-0*/ SB40-0*/ SB41-0*/ SB42-0*/ SB43-0*	 S3 S4
--	---	---

Specification


Especificaciones
Dati tecnici
Especificações
Technické údaje



	6 Years - 18+ Years
	750mm x 1070mm
	10° - 90° (+/- 5°)
	Max: 100Kg
	Max: 1900mm
	Min: 220mm Max: 440mm
	Min: 220mm Max: 440mm
	-20° +20°
	Min: 1070mm Max: 1630mm

Castors

Ruedas
Rodízios
Ruote
Rolki

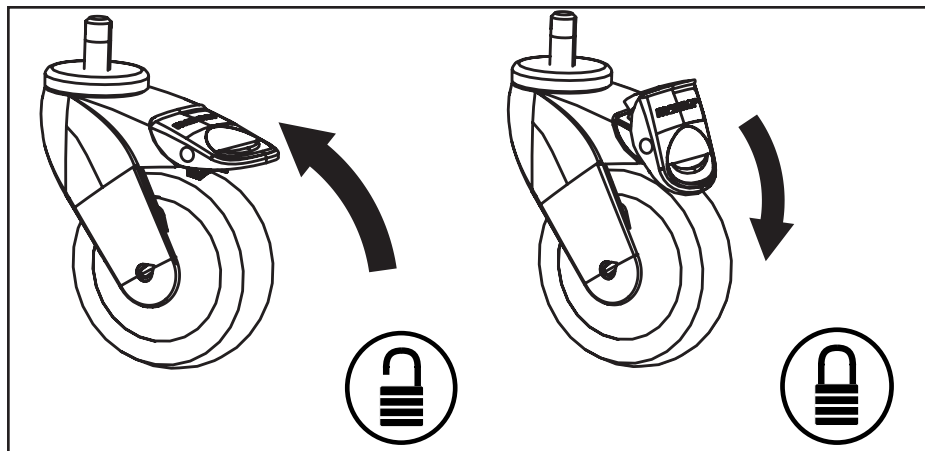


Modular Back

secciones traseras modulares
sezioni posteriori modulari
seções traseiras modulares
modułowe tylne sekcje



Max User Height

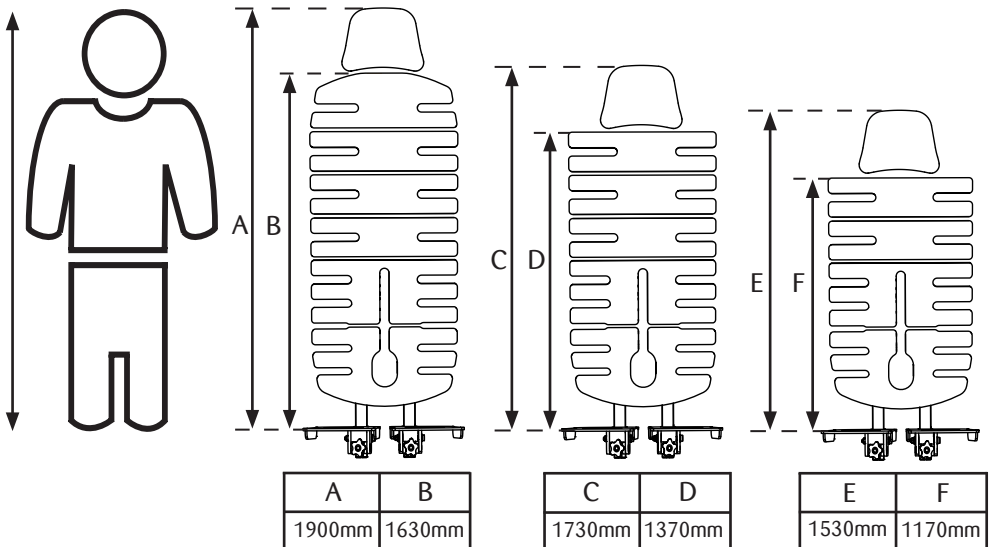

Modular Back







secciones traseras modulares

sezioni posteriori modulari

seções traseiras modulares

modułowe tylne sekcje

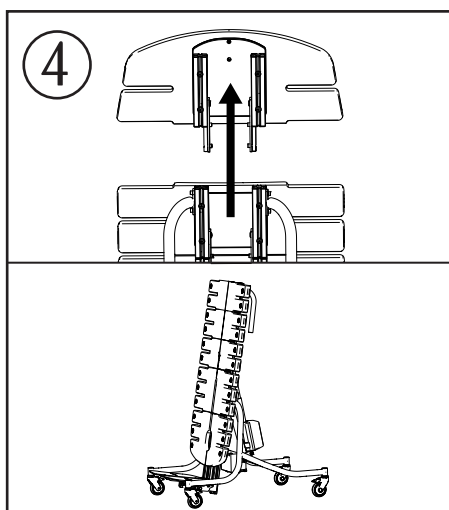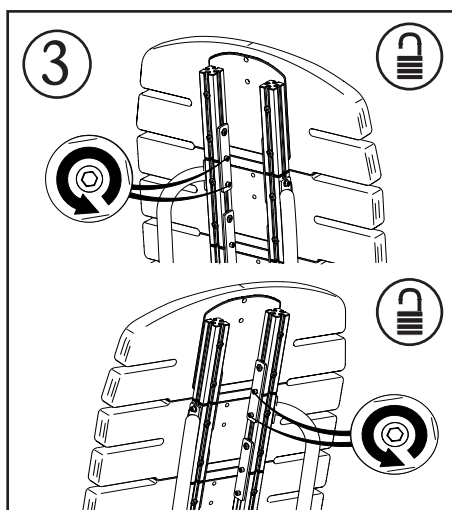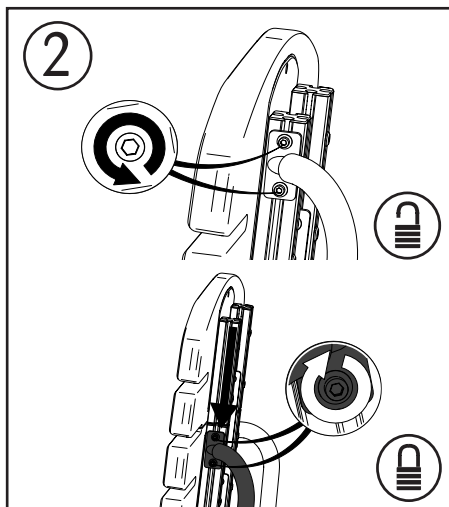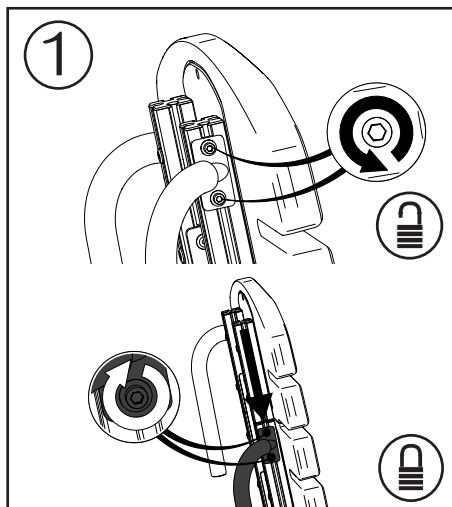





Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX® 
Positioning for life

Modular Back



secciones traseras modulares
sezioni posteriori modulari
seções traseiras modulares
modułowe tylne sekcje

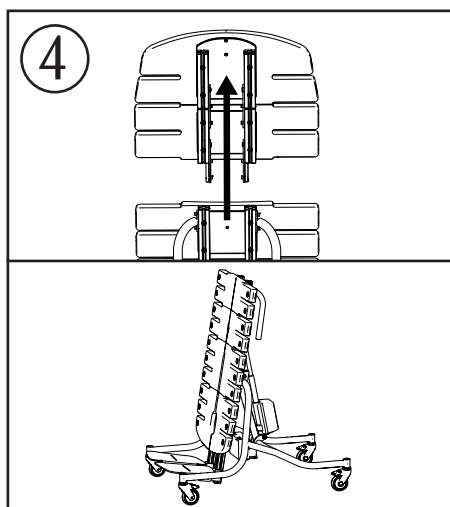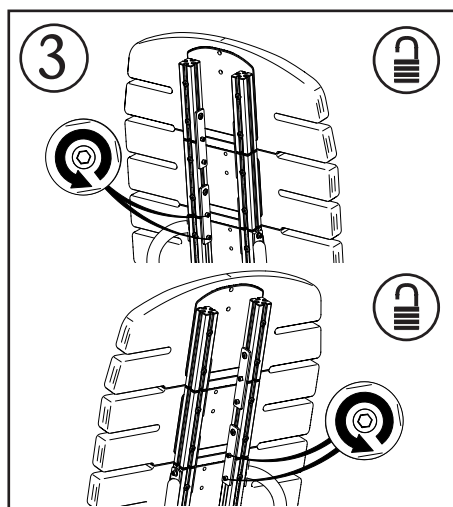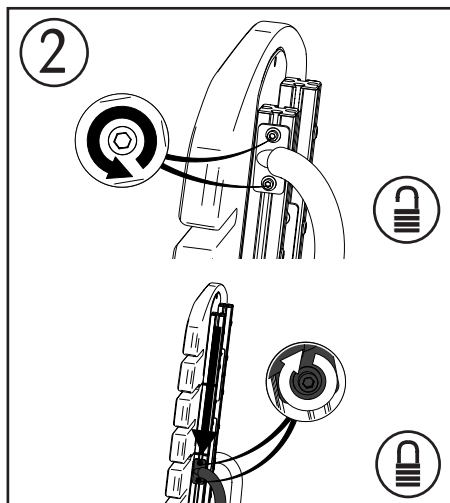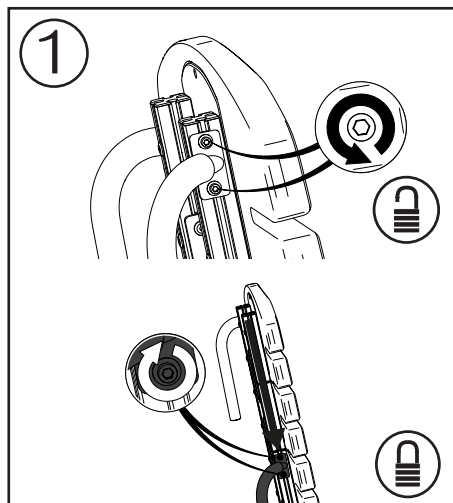




Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX[®]
Positioning for life



Battery

batería
batteria

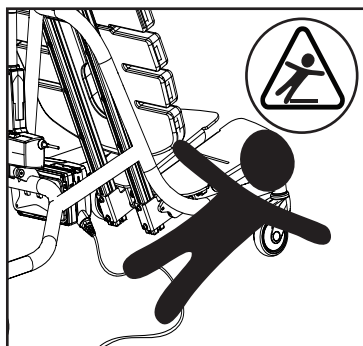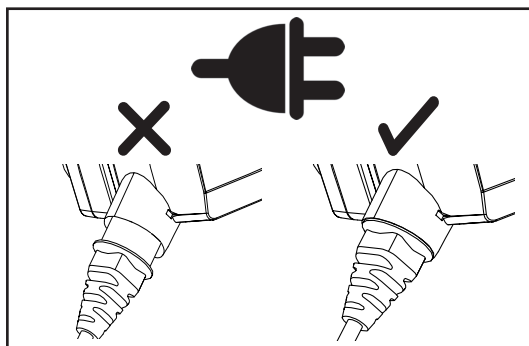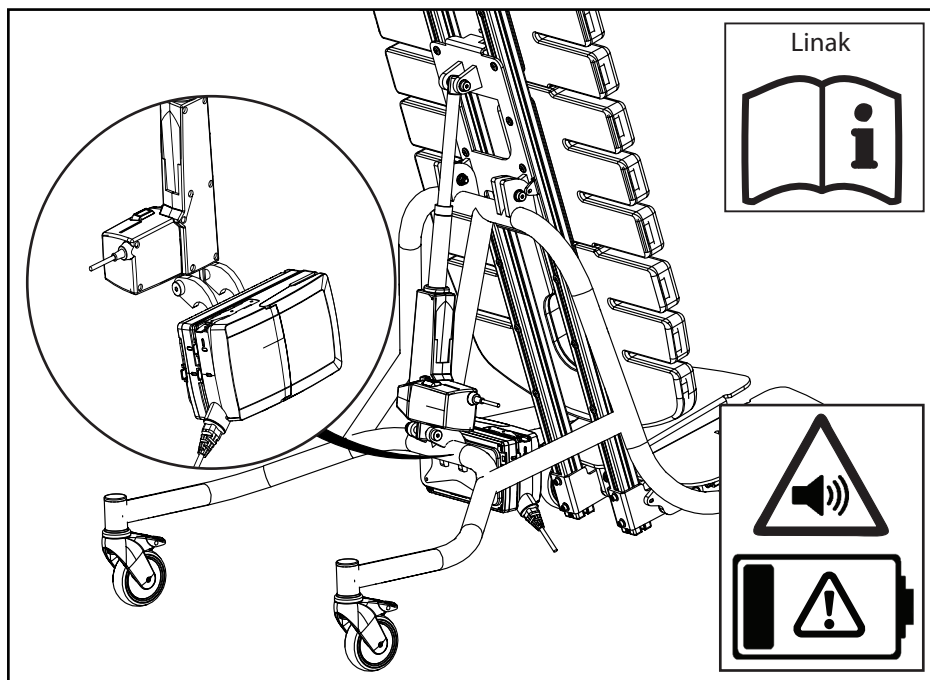

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX 
Positioning for life

Support Pads

MB07-0*






Almohadilla de soporte

Apoio pad

Supporto pad

Wsparcie pad

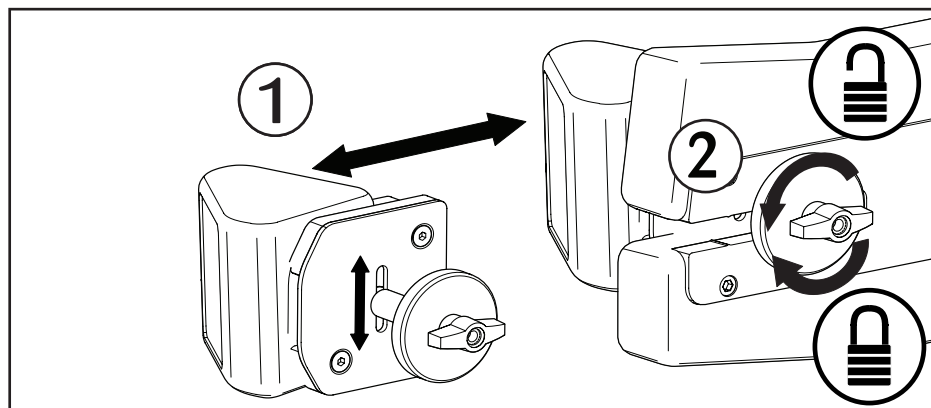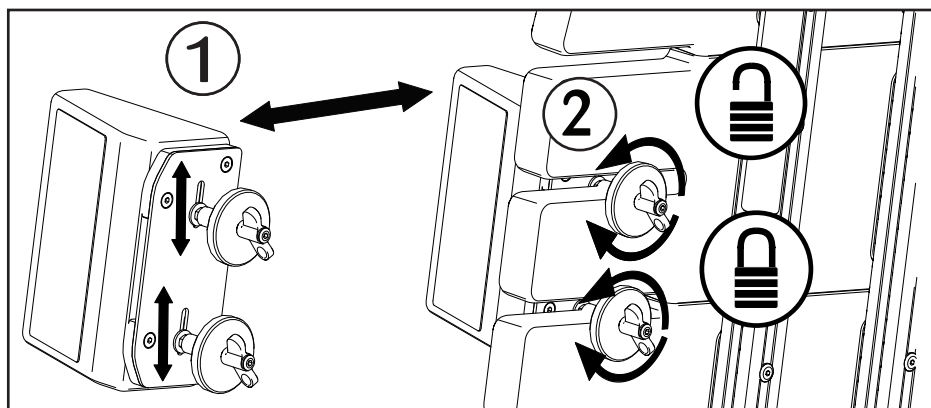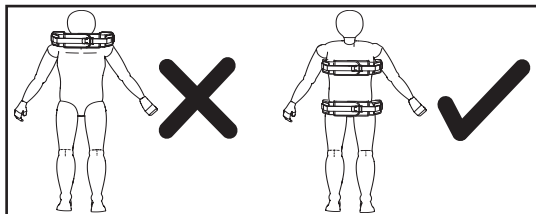


Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX® 
Positioning for life

Safety Straps

correas de seguridad
cintas de segurança
cinghie di sicurezza
pasy bezpieczeñstwa

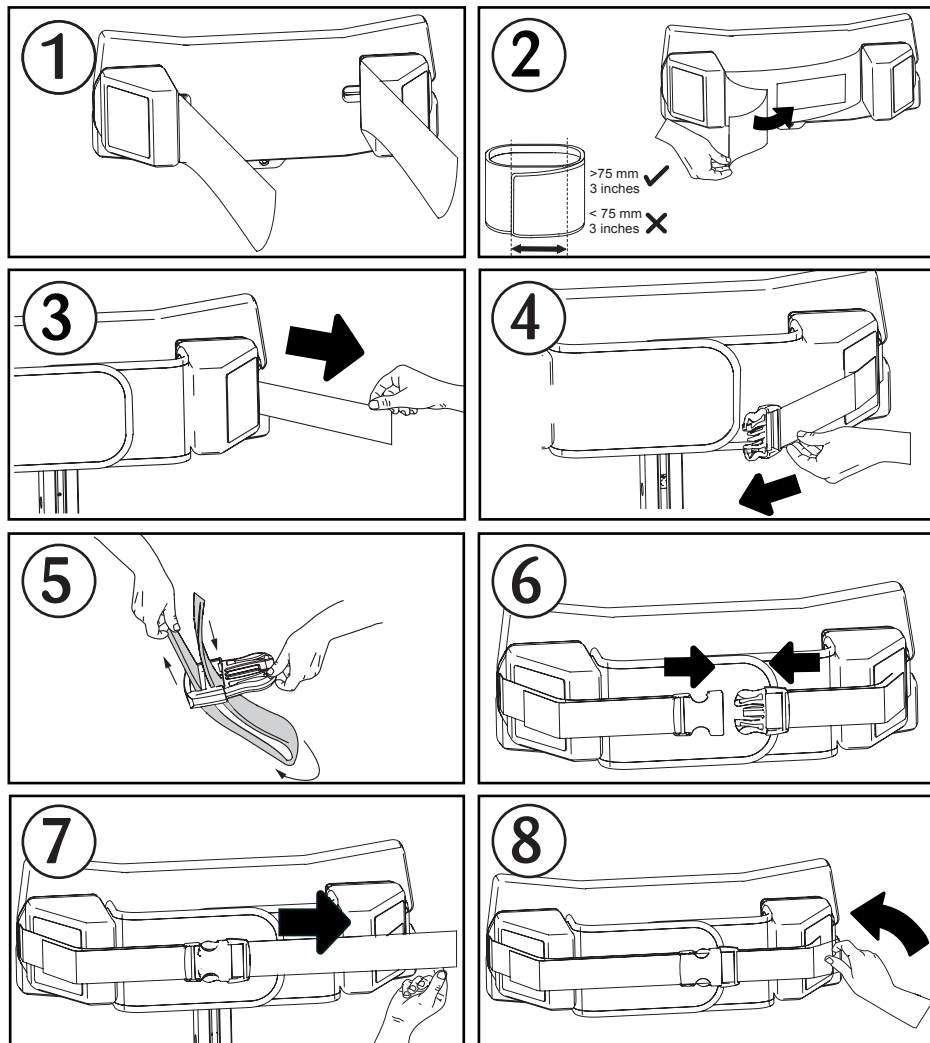







Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX® 
Positioning for life

Kneeblock De-Rotational Straps



correa de bloque de la rodilla
alça de bloco de joelho
cinturino blocco ginocchio
Pasek na kolana blok

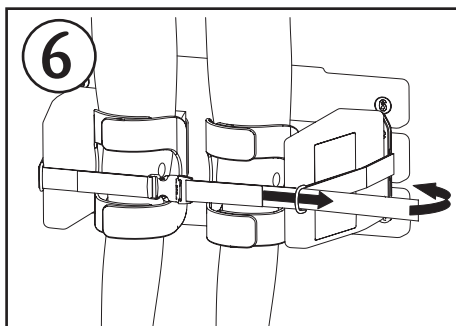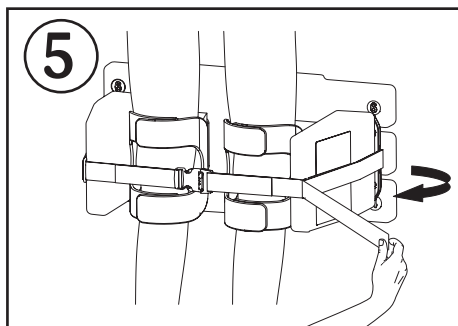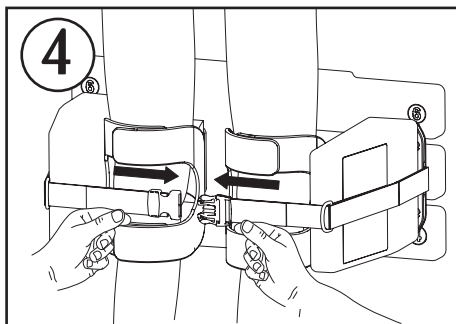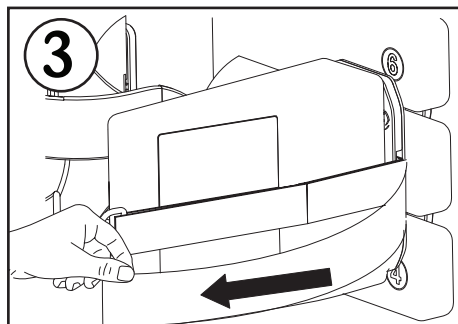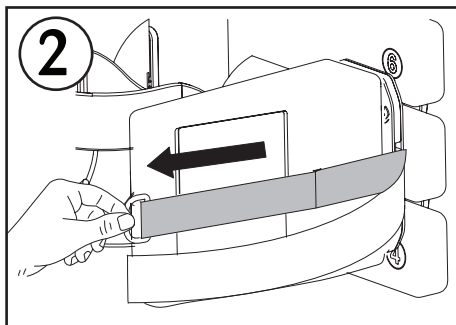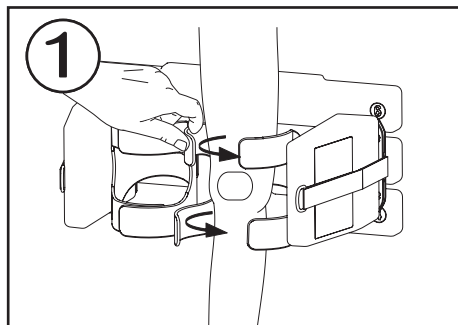

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX[®]
Positioning for life



Angle Adjustment





Ajuste del ángulo motorizado

Ajuste do ângulo motorizada

Regolazione angolo motorizzato

Regulacja kąta napędem

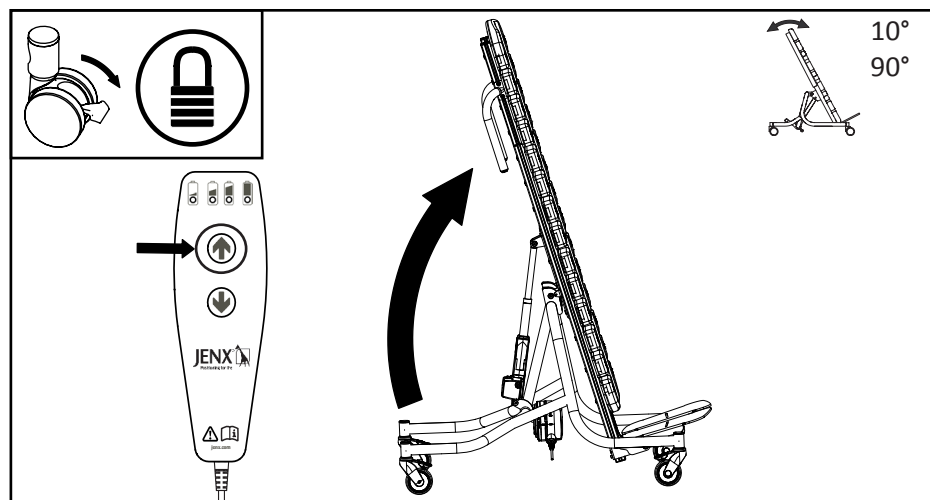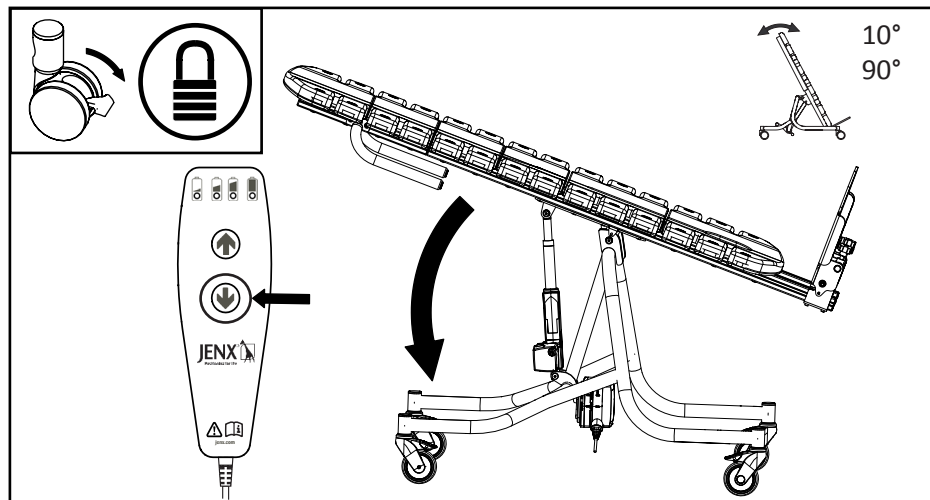

Angle Adjustment





Ajuste del ángulo motorizado

Ajuste do ângulo motorizada

Regolazione angolo motorizzato




Regulacja kąta napędem

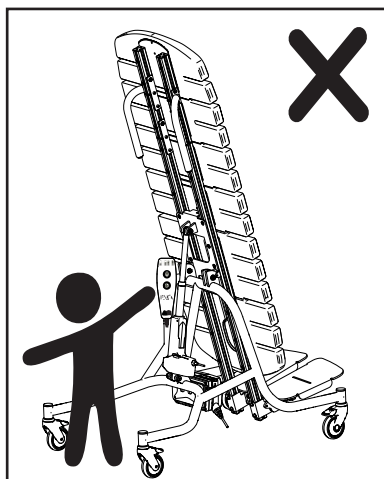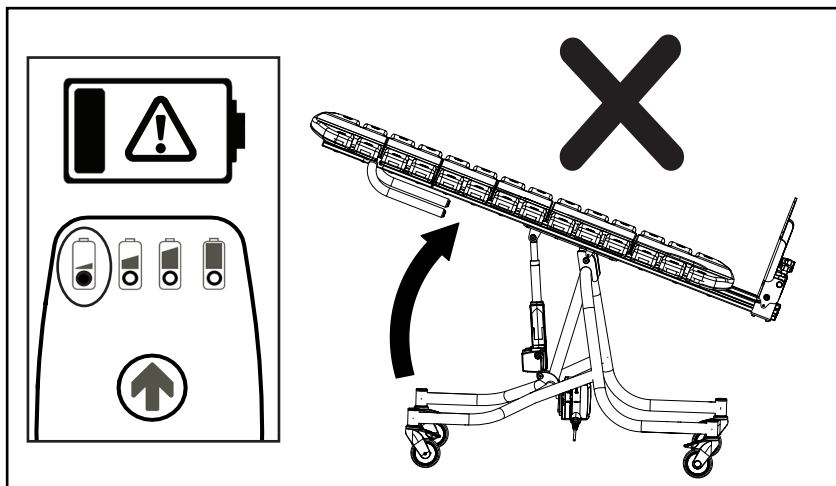

Footplate Angle



correas de seguridad
cintas de segurança
cinghie di sicurezza
pasy bezpieczeństwa

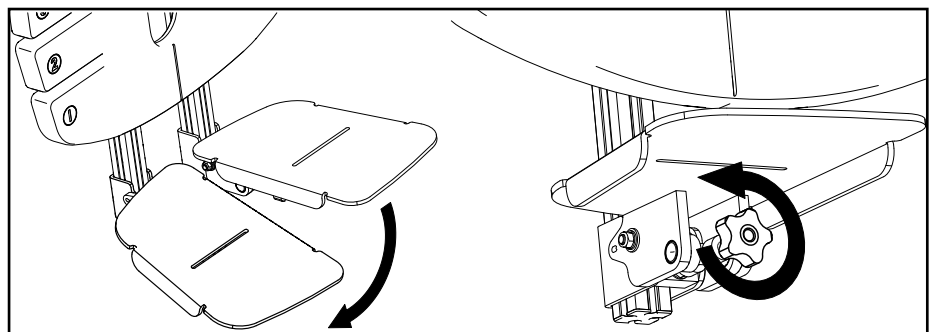
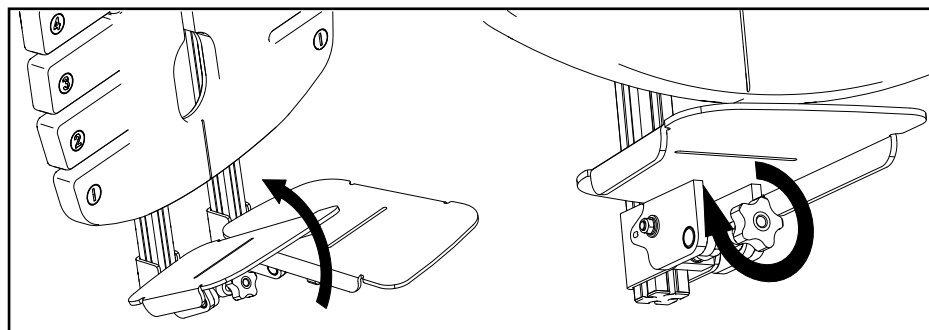
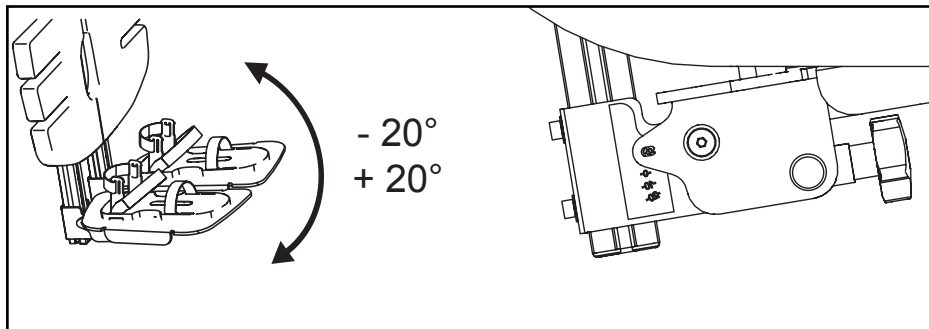


Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX® 
Positioning for life

Footplate Height




altura reposapiés
altura da placa do pé
altezza pedana
wysokość podnóżka

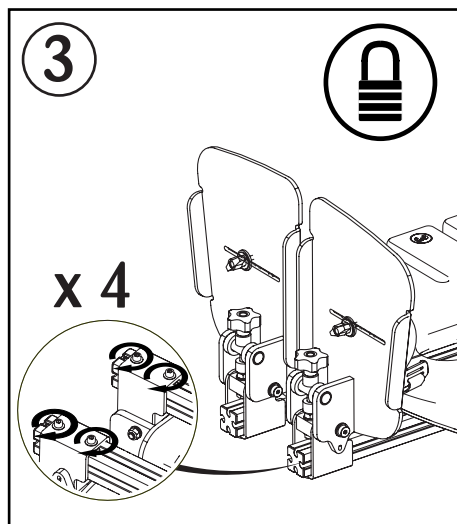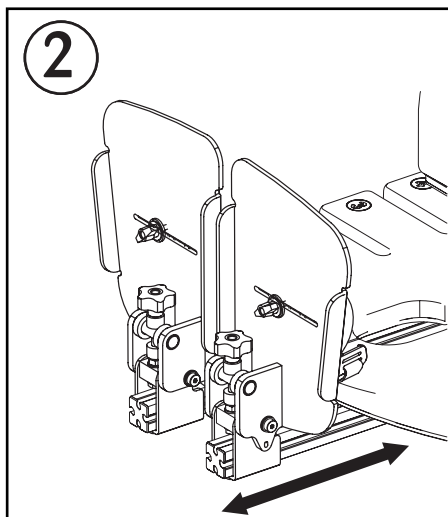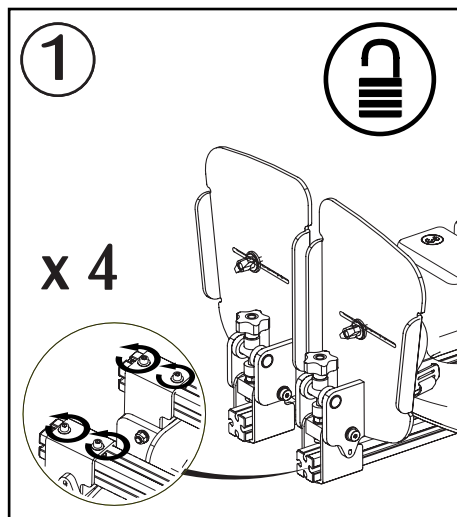

Sandals

sandalias
sandali
sandaly

S3
S4

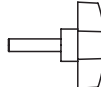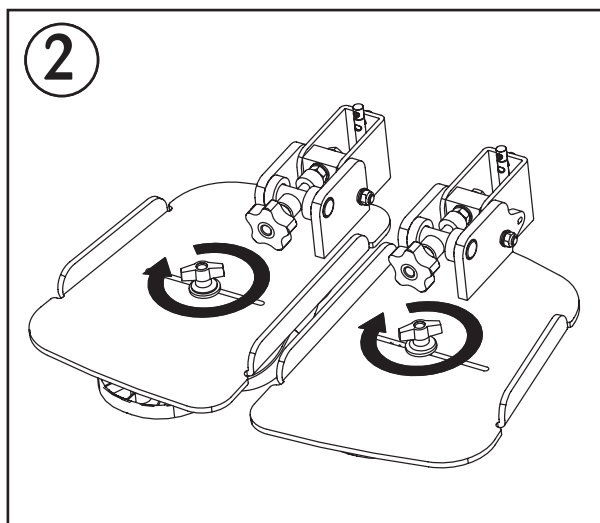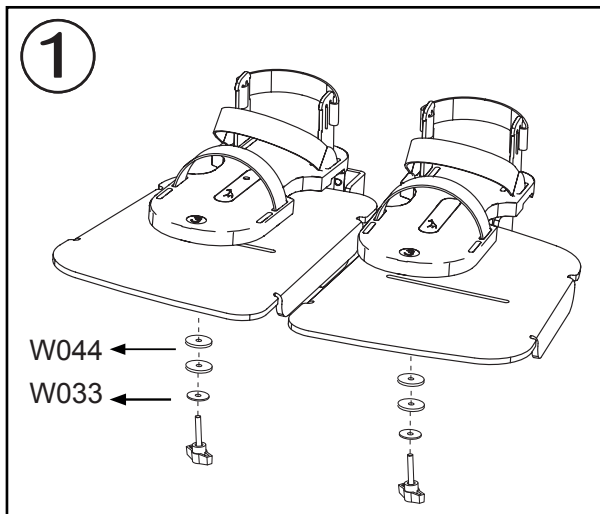

WN011 x 2



W033 x 2
(M6 Ø 25)






W044 x 4
(Ø6.4 Ø30)

Sandals




sandalias
sandali
sandaly

S3
S4

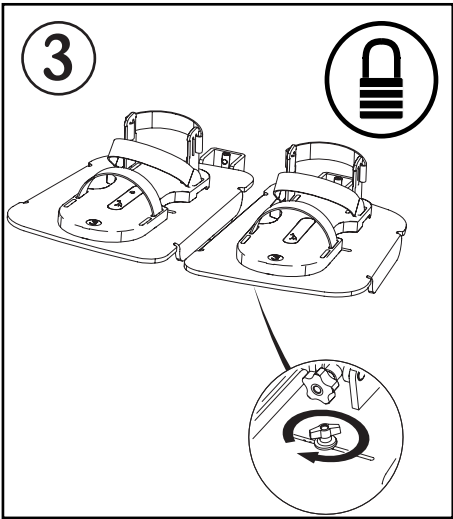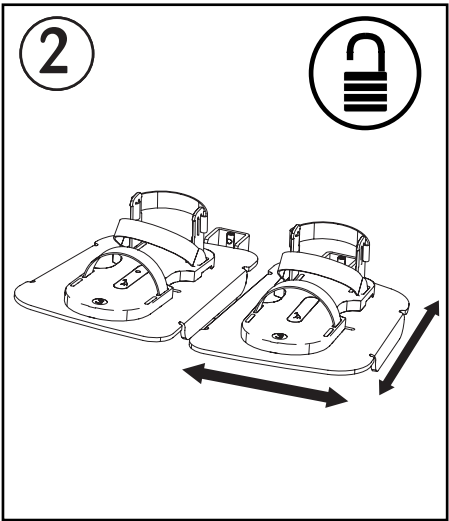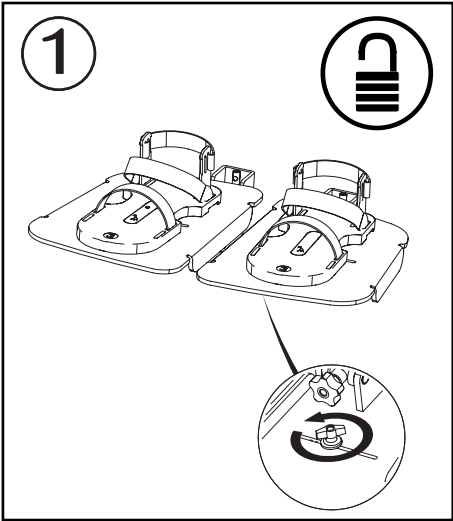

Sandals

sandalias
sandali
sandaly

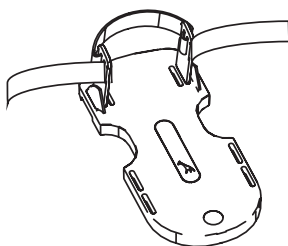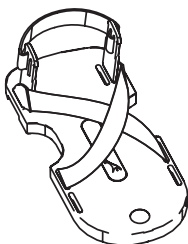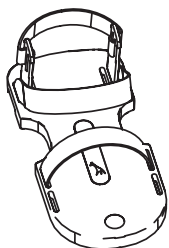

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX® 
Positioning for life

Notes

notas
notatki

Notes

notas
notatki

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com



Notes

notas
notatki

Notes

notas
notatki

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com



Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

